



MODELO TIM-EMPTYME



MODELO TIM-OSTOM

Nuestros baños cuentan con el respaldo de la FAPOE (Federación de Asociaciones de de España) en cuanto cumplen con la NORMATIVA indicada por la Comisión de Acceso Universal del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCEMFE.

En las CORTES GENERALES, DIARIO DE SESIONES, SENADO, XIV LEGISLATURA, día 13 de octubre de 2021 se aprobó por unanimidad la moción en relación a los BAÑOS ADAPTADOS A OSTOMIZADOS (Expediente 661/000747, a partir de la página 22).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VENTAJAS

GABINETE EN "SOLID SURFACE"

El gabinete completo está fabricado con un material compuesto sintético denominado "Superficie Sólida" (Solid Surface), diseñado específicamente para uso sanitario y con propiedades antibacterianas. Esto garantiza una alta higiene, facilidad de limpieza, estructura robusta y resistente, además de juntas invisibles, uniformidad en el color y flexibilidad para realizar ajustes de medidas personalizadas.

(NO está hecho de HPL sobre aglomerado, paneles laminados, ni de fibra de vidrio, que pueden causar irritación y problemas de toxicidad, o que se deforman con la humedad).

INODORO EN CERÁMICA / VACIADOR CON SIFÓN

Para evitar el retorno de olores tras tirar de la cisterna (vaciador de la bolsa). Está colocado a la altura de 750 mm desde el suelo. La altura del inodoro está calculada adecuada para vaciar y enjuagar la bolsa.

CISTERNA OCULTADA DENTRO DEL GABINETE

El bastidor con la cisterna empotrada está externo a la pared, oculto dentro del gabinete. NO se necesitan obras de albañilería. Solo se necesitan las conexiones de toma de agua y el drenaje, que son estándar.

ENCIMERA

La encimera está colocada a la altura de 750 mm desde el suelo, encastrando al inodoro, para colocar los productos necesarios para el cambio del dispositivo. Está al mismo nivel que el inodoro y así evitar caída de los productos al pavimento. Con un ancho de 725 mm diseñado para tener suficiente superficie de apoyo para el material de reemplazo.

PULSADOR NEUMÁTICO REMOTO

La operación de descarga de agua de la cisterna empotrada se activa por medio de un pulsador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga. Está colocado en la parte frontal de la encimera porque sea fácil de alcanzar.

GRIFERÍA / ENJUAGADOR DE BOLSA CON CABLE EXTENSOR

Nuestro modelo se puede utilizar con una sola mano, ya que la otra sujeta la bolsa. No hay problema incluso si solo fuera posible conectarse a agua fría: en algunos casos, si el agua está demasiado caliente, se puede dañar el estoma. El diámetro de la boquilla de la ducha NO supera los **25 mm** (35 mm es la medida de ancho boca bolsa de ileostomía).

ESPEJO GRANDE

Situado frente al usuario a ras del inodoro para una vista completa al cambiar la bolsa. Éste no tiene el pulsador de descarga de la cisterna en el medio, ni ningún accesorio, que dificulte la visualización del estoma.

PORTARROLLOS PAPEL HIGIÉNICO

Puede ser situado al lateral, a una altura cómoda.

DISPENSADOR JABÓN

Puede ser colocado de lado a una altura cómoda.

2 GANCHOS PARA COLGAR

Cercanos al inodoro o zona de cambio, práctico como colgador de enseres/prendas.

COLOCACIÓN / DIMENSIONES

El gabinete del inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared, y se puede fácilmente colocar en un espacio abierto. Las dimensiones muy compactas del kit aseo son:

- 725 mm de ancho x 640 mm de profundidad x 1645 mm de largo (MODELO GRANDE)
- 725 mm de ancho x 540 mm de profundidad x 1645 mm de largo (MODELO PEQUEÑO)



SUMINISTRO MATERIALES BAÑO ADAPTADO A OSTOMIZADOS

TODO el gabinete completo está fabricado con material compuesto sintético Superficie Sólida (Solid Surface) de uso sanitario y antibacteriano, para garantizar higiene, limpieza fácil, construcción sólida y resistente, juntas invisibles, uniformidad del color y versatilidad en ajustes de medidas personalizadas.

(NO en HPL sobre aglomerado, tablero aplacado, NO en fibra de vidrio que puede causar irritación y toxicidad, u otro material no adecuado, que se hincha con la humedad).

El ancho está diseñado para tener suficiente superficie de apoyo para el material de reemplazo.

La altura del mostrador de la encimera es calculada adecuada para vaciar y enjuagar la bolsa.

Hay un inodoro integrado de cerámica y la operación de descarga es con un controlador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua.

El controlador se coloca en la parte frontal de la encimera para facilitar el acceso.

El kit incluye:

- Mueble realizado enteramente con material sintético Solid Surface (igual al de los gráficos, fotos y planos facilitados) - kit de 2 piezas (top y base pie)
- Cisterna empotrada
- Bastidor para la cisterna empotrada
- Pulsador remoto para cisterna empotrada
- Taza de inodoro suspendido
- Enjuagador / Grifo especial con ducha extraíble (opcional)
- Espejo grande
- Piezas especiales de montaje
- Dos ganchos
- Dispensador de jabón
- Portarrollos de papel higiénico


GABINETE: El inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared y se puede colocar en un espacio abierto.

El kit de montaje debe ser instalado por personal cualificado.


La instalación y el montaje están excluidos

FICHAS TÉCNICAS

Modelo pequeño - TIM-EMPTYME-P

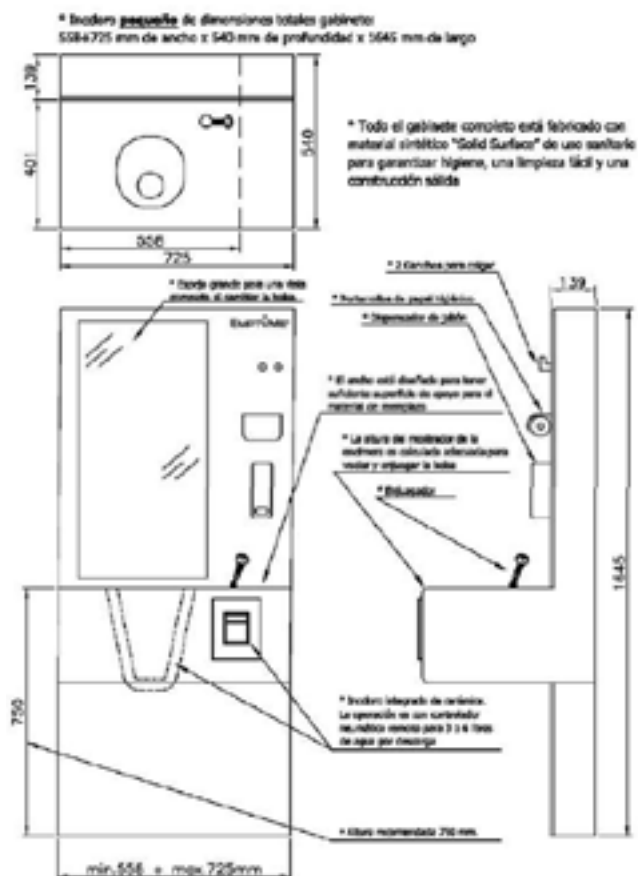

Modelo grande - TIM-EMPTYME-G

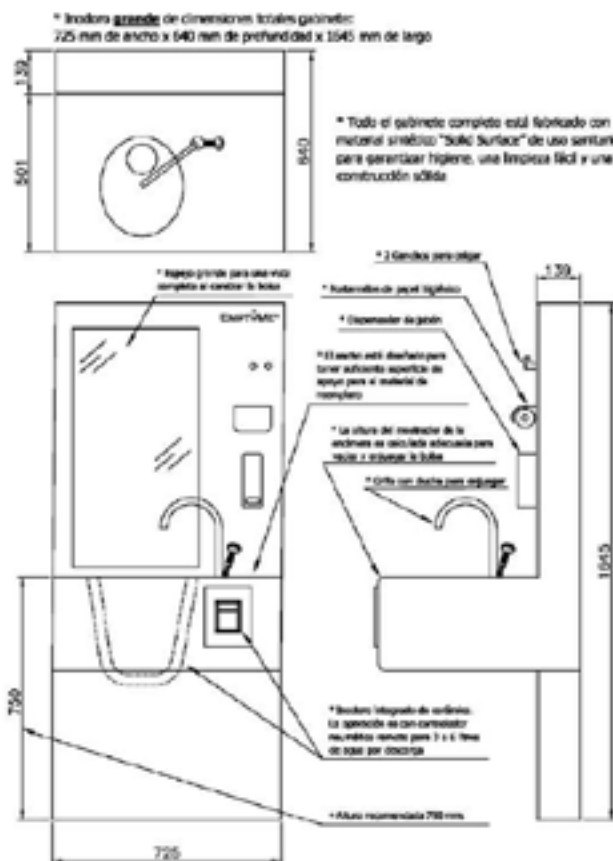

Se pueden evaluar ajustes de medidas, siempre y cuando sea posible, sin penalizar aspectos fundamentales, imprescindibles para el uso correcto del baño adaptados a personas ostomizadas.

La encimera con inodoro está colocada a la altura de 750 mm desde el suelo.



OFICINA PROPIEDAD INTELECTUAL UNIÓN EUROPEA - Registro Dibujos y Modelos Comunitarios EUIPO

- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019294-0001 Ostom Grande
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019295-0001 EmptyMe Grande
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019296-0001 Ostom Pequeño
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019297-0001 EmptyMe Pequeño
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015014307-0001 GRIFO EmptyMe



OSTOM



VENTAJAS DE ELEGIR EL ASEO OSTOM

EL ASEO OSTOM, ES LA MEJOR OPCIÓN PORQUE:

El gabinete completo está fabricado con un material compuesto sintético denominado “Superficie Sólida” (Solid Surface), diseñado específicamente para uso sanitario y con propiedades antibacterianas. Esto garantiza una alta higiene, facilidad de limpieza, estructura robusta y resistente, además de juntas invisibles, uniformidad en el color y flexibilidad para realizar ajustes de medidas personalizadas.


(NO está hecho de HPL sobre aglomerado, paneles laminados, ni de fibra de vidrio, que pueden causar irritación y problemas de toxicidad, o que se deforman con la humedad).

El aseo Ostom es lo que los ostomizados necesitan. Está diseñado bajo sus directrices y consejos. En Ostom les hemos escuchado para atender todas sus necesidades con éxito. Especialmente hemos puesto atención en minimizar la distancia entre el inodoro y el borde de la encimera de manera que la bolsa pegada a el estoma pueda ser vaciada sin dificultad.

Para montar e instalar el aseo de Ostom no hay que hacer obras: tan solo hace falta conectarlo a la entrada de agua y a la salida de aguas residuales.

El kit incluye un manual de instrucciones completo y detallado con fotos y dibujos. El montaje e la instalación no suponen dificultades, tanto si son realizados por empresas externas de fontanería como si son de propios servicios de mantenimiento interno. En cualquier caso, nosotros siempre estaremos a su disposición para ayudar, asistir y asesorar al fontanero y para contestar a cualquier duda que le pudiera surgir.

Los aseos Ostom solucionan todos los problemas a los que los ostomizados se enfrentan cada día por no disponer de baños adaptados en casi ningún lugar. Con los aseos de Ostom los ostomizados pueden normalizar sus vidas en los lugares en los que se encuentran.

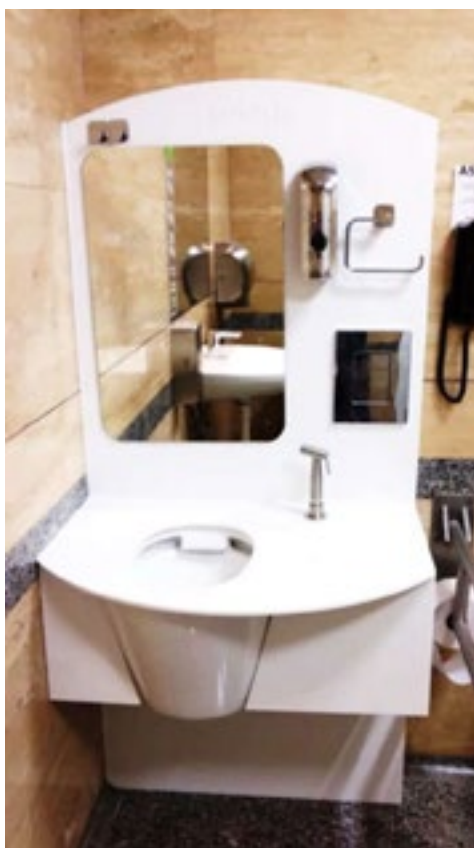



Timblau

Baños Ostomizados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE DISEÑO OSTOM®



ALTURA: La encimera con inodoro está colocada a la altura de 750 mm desde el suelo. Con lo que para vaciar la bolsa no hay que agacharse ni arrodillarse. Está diseñado para usarse en una postura saludable y evitar lesiones de espalda o de rodillas.

INODORO: el váter del servicio de BañOstom®, es de cerámica y lo suficientemente grande y profundo para no mancharse mientras se vacía la bolsa, su profundidad y tamaño evitan las salpicaduras. Además, está encastrado en una encimera con formas redondeadas de gran elegancia.

CISTERNA: el aseo de Ostom tiene la cisterna oculta dentro

del propio mueble del baño, de esta forma no hay que hacer obras de albañilería para su instalación. Tan solo será necesario contar con conexiones de toma de agua y salida de aguas residuales, que son estándar. La cisterna se acciona mediante el pulsador neumático remoto colocado en el frontal del mueble. Permite dos tipos de descarga: de 3 y 6 litros de agua.



ENJUAGADOR: el aseo de Ostom cuenta con un enjuagador de bolsa (ducha de mano de pequeño calibre conectada a un cable de ducha) que se acciona con el pulgar de la mano para poder enjuagar la bolsa tras el vaciado, mientras con la otra mano se sujeta la bolsa. El diámetro de la boquilla del enjuagador no supera los 25 mm; es inferior al de la salida de heces de las bolsas de ileostomía (35mm). Cuando el enjuagador no se está usando el cable de ducha al que va conectado queda oculto en el interior del mueble del baño. El enjuagador de bolsa es imprescindible para dejarla limpia tras el vaciado. Disponible el grifo especial con ducha extraíble (opcional).

ENCIMERA: de forma curva sin esquinas de 90°, para evitar accidentes como clavarse una esquina en el estoma. La encimera tiene una superficie lo suficientemente amplia que permite posar todos los productos de aseo y recambio tales como: bolsa de ostomía, gasas, pasta periestomal, tijeras, polvos secantes y otros productos. Está al mismo nivel que el inodoro, encastrándolo, para evitar caídas de productos.

ESPEJO: El espejo grande en el que poder verse el estoma está colocado a ras de la encimera. Es grande e imprescindible para verse el abdomen y facilitar el cambio de bolsa, sobre todo, cuando es de una sola pieza. Además, no tiene ningún elemento en medio que dificulte verse bien, como un pulsador de cisterna.



APLIQUES: el aseo Ostom también incluye apliques como jabonera y portarrollos de papel higiénico, necesario para secar la boca de salida de la bolsa tras enjuagarla, así como dos colgadores de bolso/ropa.

MATERIAL: TODO el gabinete completo está fabricado con material compuesto sintético “Superficie Sólida” (Solid Surface) de uso sanitario y antibacteriano, para garantizar higiene, limpieza fácil, construcción sólida y resistente, juntas invisibles, uniformidad del color y versatilidad en ajustes de medidas personalizadas.

(NO en HPL sobre aglomerado, tablero aplacado, NO en fibra de vidrio que puede causar irritación y toxicidad, u otro material no adecuado, que se hincha con la humedad).

El color del mueble es el blanco.


MEDIDAS: 725 mm de ancho x 1625 mm de altura total

- El modelo Ostom PEQUEÑO tiene una profundidad TOTAL de 540 mm en la parte superior borde de la encimera y de 365 mm en la parte inferior.

- El modelo Ostom GRANDE, tiene una profundidad TOTAL de 640 mm en la parte superior borde de la encimera y de 470 mm en la parte inferior.

por lo cual ambos modelos Ostom son altamente recomendados en cuanto facilitan el pasaje con las sillas de ruedas en baños para movilidad reducida y en aseos accesibles.

La encimera con inodoro está colocada a la altura de 750 mm desde el suelo.

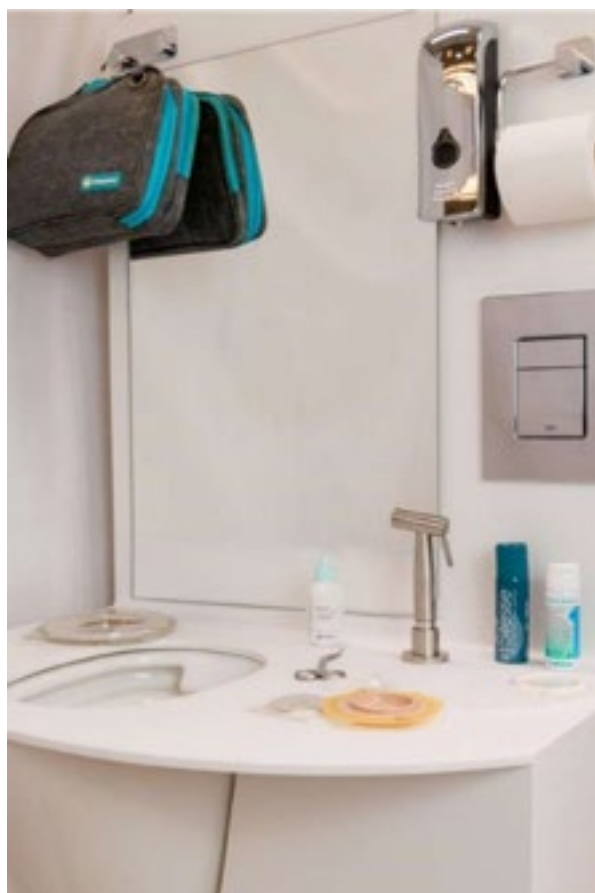



EL KIT DE OSTOM INCLUYE:


- Mueble realizado enteramente con material sintético Solid Surface (igual al de los gráficos, fotos y planos facilitados) - kit de 2 piezas (top y base pie)
- Piezas especiales de montaje
- Enjuagador de bolsa / Disponible el grifo especial con ducha extraíble (opcional)
- Espejo grande
- Inodoro suspendido de cerámica
- Cisterna empotrada
- Bastidor para la cisterna empotrada
- Pulsador remoto para cisterna empotrada
- Portarrollos de papel higiénico
- Dos perchas para bolso/ropa
- Dispensador de jabón
- GABINETE: El inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared y se puede colocar en un espacio abierto.
- El kit de montaje debe ser instalado por personal cualificado.
- La instalación y el montaje están excluidos.






FICHAS TÉCNICAS

Modelo pequeño - TIM-OSTOM-P

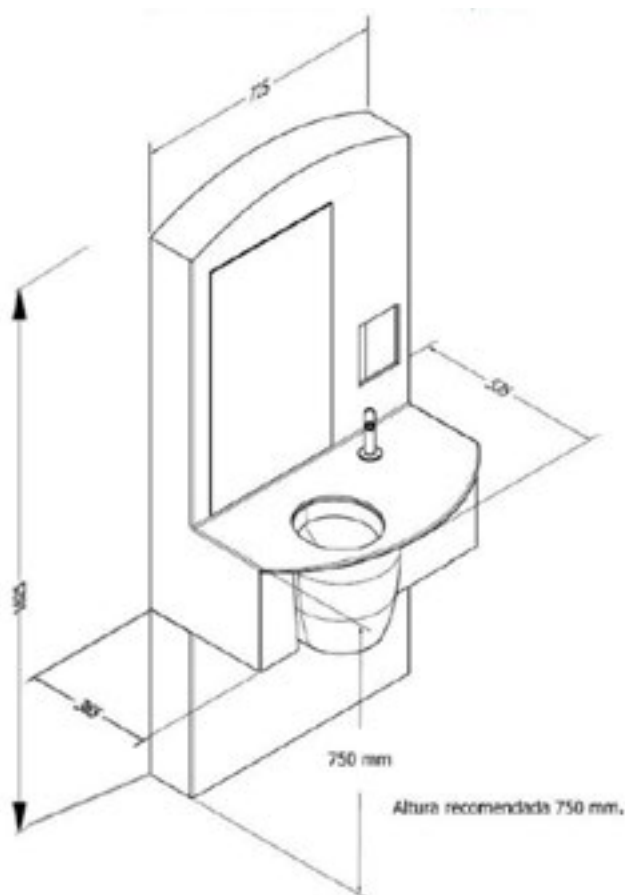

Modelo grande - TIM-OSTOM-G

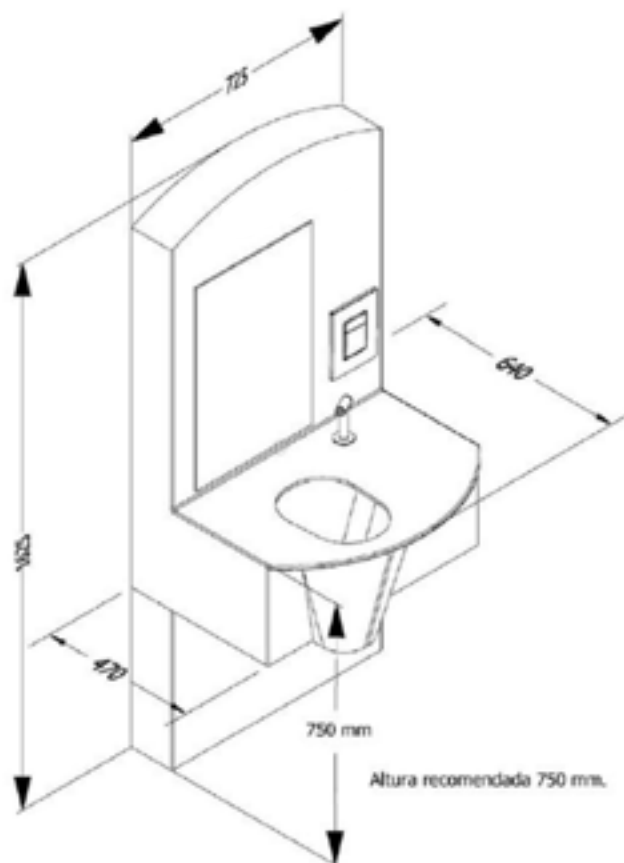

Se pueden evaluar ajustes de medidas, siempre y cuando sea posible, sin penalizar aspectos fundamentales, imprescindibles para el uso correcto del baño adaptados a personas ostomizadas.

La encimera con inodoro está colocada a la altura de 750 mm desde el suelo.

Para cualquier aclaración, no dude en contactar con nosotros sin compromiso. Estaremos encantados de atenderle.



OFICINA PROPIEDAD INTELECTUAL UNIÓN EUROPEA - Registro Dibujos y Modelos Comunitarios EUIPO

- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019294-0001 Ostom Grande
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019295-0001 EmptyMe Grande
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019296-0001 Ostom Pequeño
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015019297-0001 EmptyMe Pequeño
- CERTIFICATE OF REGISTRATION / Concesión 015014307-0001 GRIFO EmptyMe